

Het beste alternatief zonder bijwerkingen

Erectieklachten kunnen bij alle mannen voorkomen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Onder jonge mannen komen deze problemen bij minder dan 5% voor. Naarmate de leeftijd vordert loopt dit percentage op tot 42%.

Oorzaken van erectiestoornissen kunnen zijn:

- Na operatieve ingrepen (bijvoorbeeld prostaat, blaas of endeldarm)
- Diabetes Mellitus
- Hart -en vaatziekten
- Te laag testosterongehalte
- Ouderdom
- Stress, depressie of problemen op relationeel vlak
- Seksuologische problemen
- Alcohol
- Roken
- Gebrek aan lichaamsbeweging

Een vacuüm-systeem is de beste therapie-optie voor mannen die kampen met een erectiestoornis. Het kent geen bijwerkingen en is het beste alternatief wanneer het gebruik van medicatie niet de voorkeur heeft.



Een Active³ of Manual Erection System bestellen

U kunt eenvoudig en snel uw order bestellen via een van de onderstaande websites:



www.ereciiepomp.nl
www.memidis-shop.nl

Hulpmiddelen bij erectiestoornissen worden niet vergoed in de basiszorgverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft, bestaat wellicht de mogelijkheid om de aankoopkosten voor een Active Erection System (AES) of Manual Erection System (MES) bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij en veranderen jaarlijks.

In ieder geval moet u beschikken over een recept, uitgeschreven door een arts. Verder kan het helpen als de betreffende arts middels een schriftelijke verklaring toelicht, waarom de aanschaf van een erectiepompe voor u van groot belang is. Als u zekerheid wenst, adviseren wij u vóór aanschaf te overleggen met uw zorgverzekeraar.

Het **Active³ Erection System** is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIa.

Artikelnummer: AES 3
Z-Index nummer: 1519710
Medisch Hulpmiddel

CE 0483



Het **Manual Erection System** is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel.

Artikelnummer: MES 01
Z-index nummer: 15562573
Medisch Hulpmiddel

CE



Geproduceerd in Duitsland.

U heeft 2 jaar garantie op alle onderdelen, met uitzondering van de drukringen. Na de garantietermijn zijn de onderdelen altijd na te bestellen.



**Memidis
Pharma**
Wo-men's Health

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

www.ereciiepomp.nl

Active³ en Manual Erection System

Een effectief hulpmiddel bij erectiestoornissen, ongeacht de oorzaak



Active³ & Manual
Erection system

U bent bij de huisarts of uroloog geweest omdat u te maken heeft met een erectiestoornis of impotentie. Dat is niets om u voor te schamen, het is een algemeen voorkomend probleem. Alleen al in Nederland hebben ongeveer 800.000 mannen wel eens last van een erectiestoornis.

We spreken over een erectiestoornis wanneer u onvoldoende in staat bent een erectie te krijgen of te behouden. Hierdoor wordt bevredigende seks erg lastig.

Uw arts heeft u vermoedelijk aangeraden om eens meer te lezen over het gebruik van een vacuümpomp.

Het **Active³** en **Manual Erection System** (AES en MES) zijn medische erectiepompen waarmee u een erectie kan opwekken. Beide systemen zijn effectief ongeacht de oorzaak van uw erectieproblemen. Beide systemen creëren een vacuüm rond de penis waardoor een erectie ontstaat.

De **AES** of **MES** medische vacuümpomp is een geaccepteerde oplossing voor patiënten met een erectiestoornis, die niet of onvoldoende reageren op behandeling met erectiepillen zoals Viagra.

Bijna 95% van de mannen die het vacuümsysteem gebruiken is weer tevreden over de verkregen erectie.

Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, automatisch en handbediend. Het is nogal persoonlijk welk systeem uw voorkeur heeft. Laat u daarom goed informeren.



Active³ Erection System[®] (AES) zeer stil en als enige oplaadbaar.

Voordelen

Een veilige manier om een erectie op te wekken	✓
Is niet fysiek belastend	✓
Eenvoudig in gebruik	✓
Zeer effectief	✓
Wordt goed geaccepteerd	✓
Zorgt voor herstel van erectiele functies	✓

Manual Erection System[®] (MES) met handbediende vacuümpomp.

De keuze voor een **handbediend** of **elektrisch systeem** is heel persoonlijk.

Er zijn kleine verschillen tussen beide systemen. De handmatig te bedienen variant is iets goedkoper en wat stiller. Het elektrische systeem is weer makkelijker in gebruik.

Na een prostaatoperatie zijn beide opties geschikt, zij dragen in hoge mate bij aan de revalidatie van de penis en zorgen doorgaans voor herstel van erectiele functies.

Van beide apparaten zijn de losse onderdelen onderling uitwisselbaar.

Beide systemen zijn van hoogwaardige materialen gemaakt en officieel gecertificeerde medische hulpmiddelen.



Het complete erectie-systeem bestaat uit:

- Cilinder van transparant perspex.
- 2 Geleidingen voor het plaatsen van de drukringen op de cilinder.
- Conus, hulpmiddel voor aanbrengen van de drukringen.
- 4 Drukringen met diameter van 10 - 12,5 - 15 en 20 mm.
- Tube Animé glijmiddel 50 ml, op waterbasis.
- Duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
- De Active3 wordt geleverd met een oplader.
- Praktische, neutrale opbergtas.


La meilleure alternative sans effets secondaires

Les problèmes d'érection peuvent frapper tous les hommes. L'âge ne joue aucun rôle à cet effet. Chez les jeunes hommes, ces problèmes surviennent dans moins de 5 % des cas. À mesure que l'on avance en âge, ce pourcentage passe à 42 %.

Les causes de la dysfonction érectile peuvent être les suivantes :

- Après une opération chirurgicale (par exemple de la prostate, de la vessie ou du rectum)
- Diabète sucré
- Maladies cardiovasculaires
- Taux de testostérone trop bas
- Âge
- Stress, dépression ou problèmes relationnels
- Problèmes sexologiques
- Alcool
- Tabagisme
- Manque d'activité physique

Un système à vide est la meilleure option thérapeutique pour les hommes confrontés à des problèmes de dysfonction érectile. Il n'entraîne pas d'effets secondaires et constitue la meilleure alternative lorsque l'utilisation de médicaments n'est pas privilégiée.

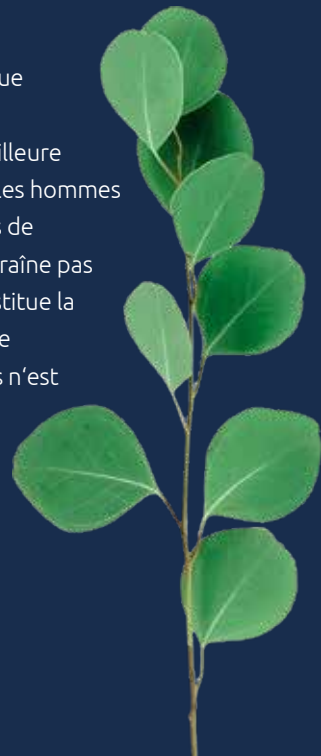

Commander un Active³ ou un Manual Erection system

Vous pouvez facilement et rapidement commander vos produits par le biais d'un des sites web ci-dessous:



fr.erectiepomp.nl
www.memidis-shop.nl

Les dispositifs d'aide pour la dysfonction érectile ne sont pas remboursés par l'assurance maladie de base. Si vous avez une assurance complémentaire, il est possible de déclarer les frais d'achat d'un Active Erection System (AES) ou d'un Manual Erection System (MES) à votre assureur soins de santé.

Les conditions varient d'une compagnie d'assurance à l'autre et changent chaque année.

Dans tous les cas, vous devez présenter une ordonnance, délivrée par un médecin. Il peut également être utile que votre médecin explique par écrit pourquoi l'achat d'une pompe à érection est très important pour vous. Si vous voulez avoir tous vos apaisements, nous vous conseillons de consulter votre assureur soins de santé avant l'achat.

L'**Active³ Erection System** est certifié comme un dispositif médical de classe IIa, conformément aux directives européennes.

Numéro d'article : AES 3
Numéro d'indice Z : 1519710
Dispositif médical

CE 0483



Le **Manual Erection System** a été certifié conformément aux directives européennes comme étant un dispositif médical.

Numéro d'article : MES 01
Numéro d'indice Z : 15562573
Dispositif médical

CE



Produit en Allemagne.

Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur toutes les pièces, à l'exception des anneaux de constriction. Après la période de garantie, les pièces peuvent toujours être commandées.



**Memidis
Pharma**
Wo-men's Health

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

ERS-2021.06.17

Active³ et Manual Erection System

Une aide efficace contre
la dysfonction érectile,
quelle qu'en soit la cause



Active³ & Manual
Erection System

fr.erectiepomp.nl

Vous avez consulté votre médecin traitant ou un urologue parce que vous souffrez de dysfonction érectile ou d'impuissance. Vous ne devez pas en avoir honte. C'est un problème fréquent. Rien qu'aux Pays-Bas, environ 800.000 hommes souffrent de temps à autres de dysfonction érectile.

On parle de dysfonction érectile lorsque vous n'est pas suffisamment en mesure d'obtenir ou de maintenir une érection. Il vous est ainsi très difficile d'avoir des rapports sexuels satisfaisants.

Votre médecin vous a probablement conseillé de vous renseigner sur l'utilisation d'une pompe à vide.

L'**Active³** et le **Manual Erection System** (AES et MES) sont des pompes à érection médicales qui vous permettent de déclencher une érection. Les deux systèmes sont efficaces, indépendamment de la cause de vos problèmes d'érection. Les deux systèmes créent un vide autour du pénis, provoquant ainsi une érection.

La pompe à vide médicale **AES** ou **MES** est une solution reconnue pour des patients souffrant de dysfonction érectile et qui ne réagissent pas ou pas suffisamment à un traitement par des pilules de l'érection comme le Viagra.

Près de 95 % des hommes qui utilisent le système à vide sont à nouveau satisfaits de l'érection obtenue.

Deux versions sont disponibles, à savoir le modèle automatique ou manuel. Le système que vous préférez est plutôt un choix personnel. Par conséquent, veuillez à bien vous informer.



Active³ Erection System[®] (AES) très silencieux et le seul rechargeable

Avantages

Un moyen sûr de déclencher une érection	✓
N'implique aucune charge physique	✓
Simplicité d'utilisation	✓
Très efficace	✓
Est bien toléré	✓
Restaure la fonction érectile	✓

Manual Erection System[®] (MES) avec pompe à vide à commande manuelle

Le choix d'un **système manuel** ou **électrique** est très personnel. Il existe des différences mineures entre les deux systèmes. La version manuelle est un rien meilleur marché et plus silencieuse. Le système électrique est, quant à lui, plus facile à utiliser.

Après une opération de la prostate, les deux options conviennent. Elles contribuent largement à la revalidation du pénis et restaurent généralement les fonctions érectiles.

Les pièces individuelles des deux appareils sont interchangeables.

Les deux systèmes sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et sont des dispositifs médicaux officiellement certifiés.



Le système érectile complet se compose des éléments suivants:

- Un cylindre en perspex transparent.
- 2 anneaux de guidage pour placer les anneaux de constriction sur le cylindre.
- Un cône, c'est-à-dire une aide pour appliquer les anneaux de constriction.
- 4 anneaux de constriction d'un diamètre de 10 - 12,5 - 15 et 20 mm.
- Un tube de lubrifiant Animé de 50 ml, à base d'eau.
- Un mode d'emploi clair en français.
- L'Active3 est fourni avec un chargeur.
- Un sac de rangement pratique et neutre.