

قصور الانتصاب: إجابات
للرجال

فهم خيارات علاجك



إجابات للرجال

قصور الانتصاب ليس مجرد مشكلة طبية، بل يمكن أن يكون له أثر عميق على علاقاتك.⁴



كيف أثر قصور الانتصاب على علاقاتك؟

"غابت الحميمية التي اعتدنا عليها. وفجأة، صار الأمر كما لو كنا منفصلين تمامًا. لم يكن هناك تواصل."

- توم

ما هي أسباب قصور الانتصاب؟^{1,3}

لا يوجد سبب وحيد لقصور الانتصاب. هناك العديد من الأسباب الجسدية والنفسية لقصور الانتصاب.

وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة:

- مرض السكري
- المشكلات القلبية الوعائية (ارتفاع ضغط الدم، ومرض القلب)
- علاج سرطان البروستاتا
- العمليات الجراحية (في البروستاتا، والمثانة، والقولون، والمستقيم)
- الأدوية (أدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب)
- خيارات أسلوب الحياة (التدخين، والإفراط في شرب الكحوليات، والسمنة، وقلة ممارسة الرياضة)
- إصابات الحبل الشوكي
- المشكلات الهرمونية


ما هو قصور الانتصاب (ED)؟

يُعرّف قصور الانتصاب على أنه العجز الدائم عن تحقيق الانتصاب أو المحافظة على صلابته بما يكفي للمعاشرة الجنسية.¹

ما مدى شيوع الإصابة بـ قصور الانتصاب؟

قصور الانتصاب مشكلة شائعة ومن المهم أن تعرف أنك لست وحدك.


التصنيف التفصيلي لعمر الرجال المصابين بالعجز الكامل عن تحقيق أي انتصاب¹

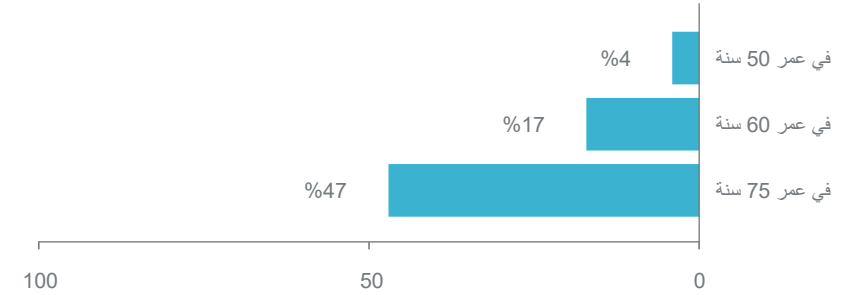

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصور الانتصاب، تفضل بزيارة EDCures.com

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصور الانتصاب، تفضل بزيارة EDCures.com


قصور الانتصاب: إجابات للرجال

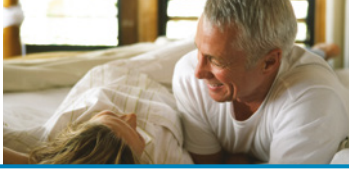

للتعرف على مزيد من المعلومات عن قصور الانتصاب، من المهم أن تفهم كيف يؤدي القضيبي عمله في الظروف الطبيعية. تتطوي عملية الانتصاب على 5 مراحل نذكرها فيما يلي:


1. الامتلاء المبدي

مع الإثارة النفسية أو الجنسية، تسبب الناقلات العصبية ارتخاء العضلات الملساء بالقضيبي، ما يزيد تدفق الدم إلى الأجسام الكهفية (الغرفتان الموجودتان داخل جسم القضيبي).

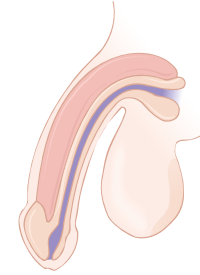


3. الانتصاب الكامل

يُمنع تصريف حجم الدم الزائد من داخل القضيبي إلى خارجه، ما يؤدي إلى تمدد القضيبي وصولاً إلى الانتصاب الكامل.

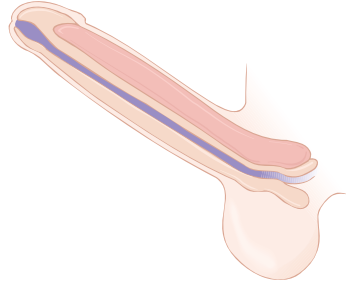


4. الانتصاب الصلب

تتحقق الصلابة القصوى. يتضخم طرف القضيبي وجسم القضيبي الأمامي حتى تنضغط أوردة القضيبي انضغاطاً قسرياً. يزيد ذلك من احتقان القضيبي بالدم ويُبقيه على صلابته القصوى.

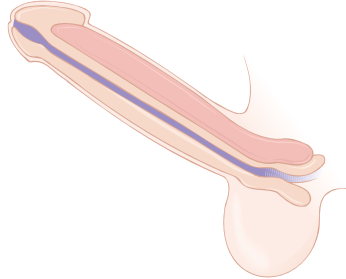


2. الانتصاب الجزئي

تتمدد شرايين القضيبي للتكيف مع زيادة تدفق الدم اللازم لإطالة القضيبي وتمده.

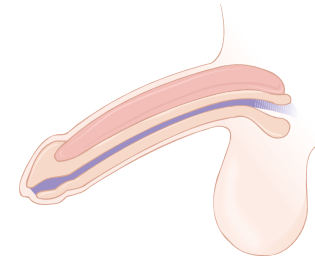

5. العودة للارتخاء

تؤدي الانقباضات العضلية إلى زيادة تدفق الدم إلى خارج القضيبي، فيقل طول القضيبي ومحيطه حتى يرتخي.

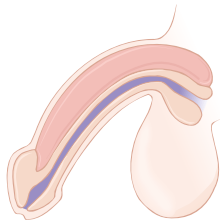




تحميل مجرى البول

يتم إدخال مُوزَّع يحتوي على حبيبة صغيرة (تحميلة) في مجرى البول وتُطلق الحبيبة. تنوب الحبيبة وتزيد تدفق الدم إلى القضيب، ما يؤدي إلى حدوث الانتصاب.




الحقن

في حالة العلاج بالحقن، تُستخدم إبرة لحقن الدواء في القضيب مباشرةً. يتيح الدواء تدفق الدم إلى القضيب، ما يؤدي إلى حدوث الانتصاب.

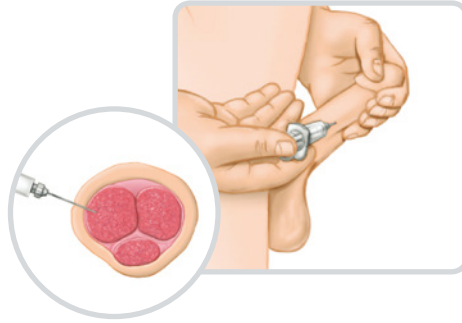

غرسات القُضيب

هي أجهزة طبية تغرس في القضيب بحيث تتيح للرجال المصابين بقصور الانتصاب تحقيق الانتصاب. ويكون الجهاز مخفيًا تمامًا داخل الجسم. ولتشغيله، ليس عليك إلا أن تضغط المضخة وترخيها في كيس الصفن لتحقيق الانتصاب.

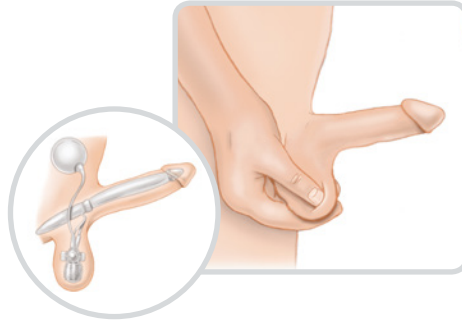

نزف إليكم أنباءً سارة إذ إن هناك خيارات لعلاج قصور الانتصاب، والخيارات المتوفرة أمامكم متعددة. لا تكون الأدوية الفموية فعالة لدى بعض الرجال، لذلك من المهم أن تكون على دراية بجميع خياراتك⁵⁻⁷. سيناقتشك طبيبك في الخيارات التي قد تلائمك، وكذلك مخاطرها وفوائدها المحتملة.


الأدوية الفموية

هناك العديد من الأدوية الموصوفة المتاحة التي قد تحسن تدفق الدم إلى القضيب. ولدى تناول هذه الأدوية مع توفر الإثارة الجنسية، يمكن أن يؤدي هذا إلى انتصاب.

أجهزة التفريغ المساعدة على الانتصاب

توضع أسطوانة بلاستيكية على القضيب، وتؤدي المضخة (التي هي إما مضخة يدوية أو تُدار بالبطارية) إلى إحداث شفط تفريغي داخل الأسطوانة، فيُسحب الدم إلى القضيب ما يؤدي إلى الانتصاب.

يوضع شريط شد قابل للمط عند قاعدة القضيب للمساعدة على الحفاظ على الانتصاب.

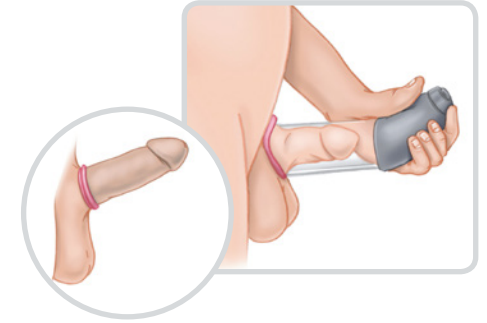



دعامة القضيب هي جهاز طبي يُغرس في جسم الرجل. وتُجرى الجراحة عادةً كإجراء لمريض داخلي.¹⁴

دخلت غرسات القضيب مجال الاستخدام السريري منذ ما يزيد على 45 سنة⁸ وساعدت Boston Scientific أكثر من 500000 رجل على استعادة الحياة الجنسية النشطة والمُرضية.⁹ وتوفر الغرسات خيارًا للرجال الذين جربوا علاجات أخرى من دون نجاح. تبين عدة دراسات أن أغلب المرضى وشريكاتهم راضون إلى حد كبير عن النتائج.¹⁰

يمكن للتوصل إلى خيار علاجي لقصور الانتصاب أن يغير الحياة لدى كثير من الرجال وشريكاتهم. واختيار دعامة القضيب الأنسب لك هو خيار شخصي جدًا. ونظرًا لأن كل نوع من الغرسات يقدم خصائص فريدة، يُستحسن أن تناقش مخاطر كل منها وفوائدها مع الطبيب لمساعدتك على انتقاء الخيار المناسب لك.

خصائص دعامة القضيب:

- مخفية تمامًا داخل الجسم¹⁰
- يمكن أن توفر خيار علاج طويل الأمد لقصور الانتصاب¹⁵
- فور تشغيلها، يمكنك أن تحافظ على انتصاب طيلة المدة التي تريدها¹⁵
- تلقائية – يمكنك الجماع وقتما تتطلب حالتك المزاجية المعاشرة الجنسية¹⁵
- لا تعوق عادةً القذف أو النشوة.¹⁵
- مصممة لتشعرك كما لو أنك شخص طبيعي خلال المعاشرة الجنسية¹⁵

مخاطر دعامة القضيب¹⁰:

- ستجعل الانتصابات الطبيعية أو التلقائية، وغير ذلك من خيارات العلاج التدخلي، مستحيلة
- إذا حدثت عدوى، فقد تُضطر لإزالة الدعامة
- قد تسبب قصر القضيب أو انحنائه أو تنديه
- الألم (الذي يصاحب عادةً عملية التعافي)
- قد يحدث عطل آلي بالدعامة

للحصول على مزيد من المعلومات عن العلاجات المتاحة، تفضل بزيارة EDCures.com





رضا المرضى وشريكاتهم





يمكن لقصور الانتصاب أن يقلل الحميمية بينكما، وأن يؤثر على ثققتك بنفسك وعلى علاقاتك الأكثر أهمية.⁴

120 شريكة، وجد كل من الرجال وشريكاتهم دعامة القضيب AMS 700™ مُرضية¹²:


غالبًا ما يتساءل المرضى إذا كان نشاطهم الجنسي سيظل على حاله، وإذا كانوا سيستطيعون التمتع بالنشوة والإحساس. وفي دراسة ضمت 200 مريض و

في إحدى الدراسات التي ضمت 106 مريضًا من مرضى قصور الانتصاب، تلقى 32 منهم دعامة القضيب. ومن بينهم، كان 93% راضين عن الدعامة.¹¹

تبيّن دراسات عدة أن غرسات القضيب يمكن أن تقدم النتائج المُرضية التي يسعى إليها العديد من الأزواج والزوجات. استشر طبيبك لتحديد نوع الدعامة الأنسب لحالتك ولأسلوب حياتك.

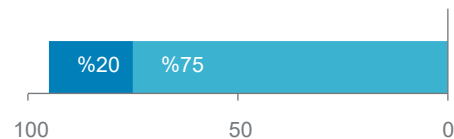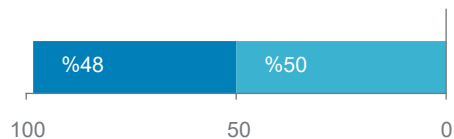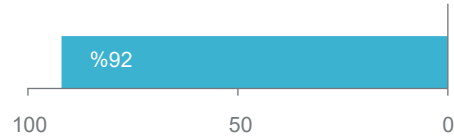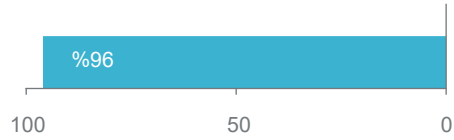

رضا المرضى بصفة عامة عن علاجات قصور الانتصاب¹¹

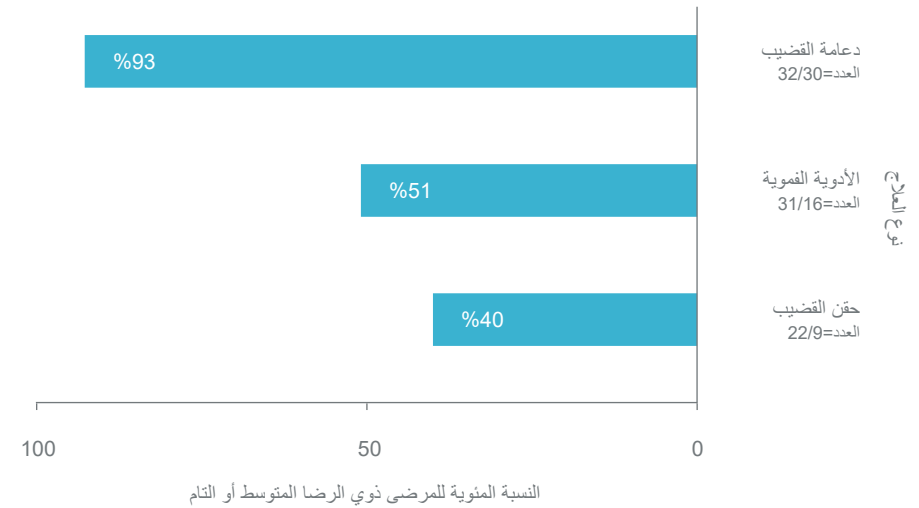

لسماع قصص المرضى الحقيقية، تفضل زيارة EDCures.com

لسماع قصص المرضى الحقيقية، تفضل زيارة EDCures.com

جهاز AMS 700™ التعويضي للقضيب – دعامة قضيب قابلة للنفخ مكوّنة من ثلاثة أجزاء



تتكوّن دعامة القضيب القابلة للنفخ، المكوّنة من 3 أجزاء، والممتلئة بالسائل من زوج من الأسطوانات التي تُغرس في القضيب، ومن مضخة تُغرس في كيس الصفن، ومستودع يُغرس في أسفل البطن.

تؤدي آلية ضغط المضخة وإرخاؤها إلى تحريك السائل داخل الأسطوانتين، فيؤدي ذلك إلى الانتصاب. قم بإفراغ الجهاز عن طريق ضغط زر الإفراغ الموجود على المضخة. يعود القضيب حينذاك إلى حالة اللين والارتخاء والمظهر الطبيعي.¹⁶

دعامة القضيب المكوّنة من 3 أجزاء مخفية تمامًا داخل الجسم ومصممة لإحداث انتصاب طبيعي.

ومن ضمن خصائص دعامة القضيب المكوّنة من 3 أجزاء تمدد محيطها (كل أسطوانات AMS 700™) وطولها (أسطوانات AMS 700 LGX™).

خيارات إضافية للغرسات

توفر Boston Scientific نوعين إضافيين من غرسات القضيب، هما جهاز Ambicor™ التعويضي للقضيب القابل للنفخ والمكوّن من جزأين، وجهاز Tactra™ التعويضي للقضيب القابل للطي (القابل للثني) المكوّن من جزء واحد. يرجى استشارة الطبيب لتحديد أي الغرسات أنسب لك.

غرسة القضيب AMS 700™ LGX

- هي غرسة القضيب الوحيدة المتوفرة في السوق، والتي تضم أسطوانات تتمدد بحيث تزيد من محيط القضيب وطوله بنسبة 10-25%¹⁷
- الأسطوانات مصممة للتعامل مع أولى وأهم المخاوف التي تخطر ببال الرجال المصابين بقصور الانتصاب، وهو فقدان طول القضيب^{18,19}
- التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصلابة القصوى والتمدد الأمثل لكل من الطول والمحيط كذلك¹⁷
- انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر طيلة الفترة المرغوبة¹⁷
- يضمن لك مظهرًا طبيعيًا خلال الارتخاء في وضع تفريغ الغرسة¹⁷

غرسة القضيب AMS 700™ CX

- التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصلابة القصوى والتمدد الأمثل للمحيط²⁰
- انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر طيلة الفترة المرغوبة¹⁷
- التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصلابة القصوى والتمدد الأمثل للمحيط¹⁷
- انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر طيلة الفترة المرغوبة¹⁷
- يضمن لك مظهرًا طبيعيًا خلال الارتخاء في وضع تفريغ الغرسة¹⁷

غرسة القضيب AMS 700™ CXR

- كل مزايا سلسلة غرسات AMS 700، بما في ذلك تمدد محيط القضيب للمرضى الذين قد يكونون في حاجة لأسطوانات أقصر وأضيق²⁰
- التمدد المنضبط مصمم لتوفير الصلابة القصوى والتمدد الأمثل للمحيط¹⁷
- انتصاب قوي وصلب يمكن أن يستمر طيلة الفترة المرغوبة¹⁷
- يضمن لك مظهرًا طبيعيًا خلال الارتخاء في وضع تفريغ الغرسة¹⁷

مع توفر المزيد من المعلومات التي يجب عليّ معرفتها، ما الذي لم أفكر فيه؟




الجراحة

يُجرى إجراء الدعامة عادةً للمرضى الداخليين في المستشفى. وبشكل عام، يُسجل المرضى وصولهم صباح يوم الخضوع للإجراء ويغادرون المستشفى خلال 24 ساعة. يتلقى المرضى التخدير أثناء الجراحة. يمكن للطبيب أن يخبرك بالمزيد من المعلومات عن الإجراء الجراحي.

التعافي

وقد تصاب بألم وتقرح في موقع العملية الجراحية. عادةً ما يستغرق الأمر بضعة أيام لتعود إلى روتينك اليومي المعتاد في النشاط الخفيف. وعادةً ما تكون المدة الكاملة للتعافي قبل استخدام الجهاز حوالي 6 أسابيع.

الأجهزة التعويضية للقضيب من نوع AMS 700™

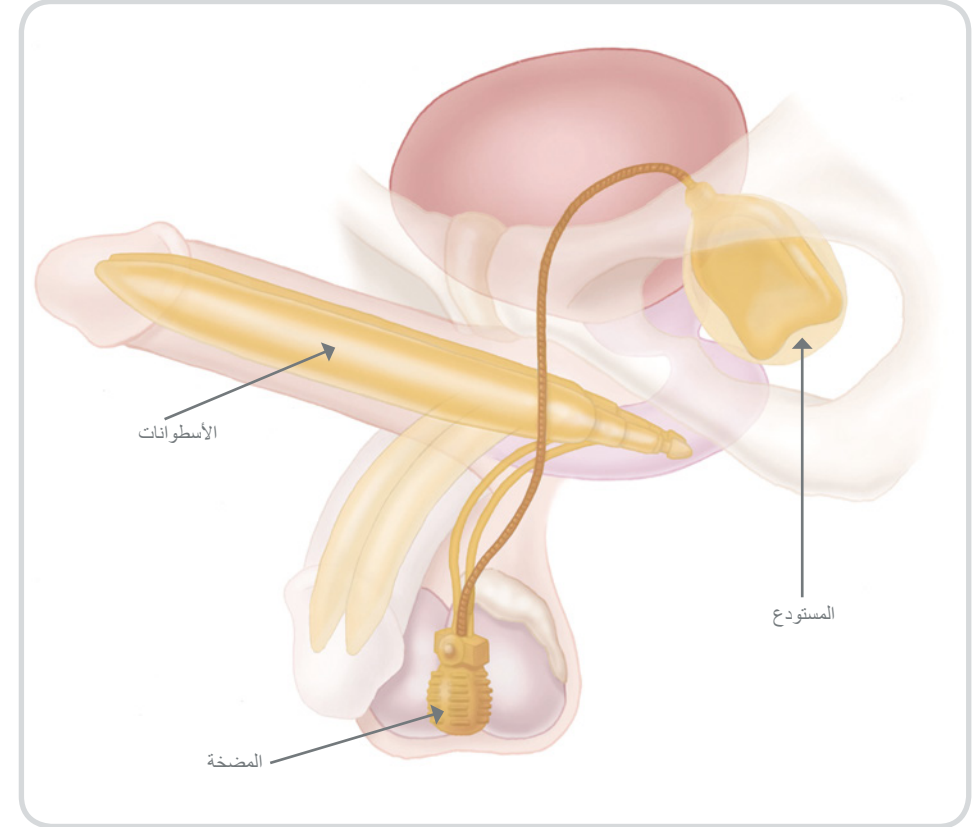

خلال آخر 6 شهور

منخفضة جدًا	منخفضة	متوسطة	مرتفعة	مرتفعة جدًا	0	1	2	3	4	5	1. كيف تُصنّف ثقّتك في قدرتك على الحصول على انتصاب والحفاظ عليه؟	
لا يوجد نشاط جنسي	تقريبًا مطلقًا أو مطلقًا	بضع مرات (أقل بكثير من نصف عدد المرات)	أحيانًا (قرابة نصف أكثر بكثير من نصف عدد المرات)	أغلب المرات	0	1	2	3	4	5	2. عندما حدث لك انتصاب مع الإثارة الجنسية، كم مرة كانت الانتصابات صلبة بما يكفي للإيلاج (إدخال القضيب)؟	
لم أجرب المعاشرة الجنسية	تقريبًا مطلقًا أو مطلقًا	بضع مرات (أقل بكثير من نصف عدد المرات)	أحيانًا (قرابة نصف أكثر بكثير من نصف عدد المرات)	أغلب المرات	0	1	2	3	4	5	3. أثناء المعاشرة الجنسية، كم مرة استطعت الحفاظ على انتصابك بعد الإيلاج (إدخال القضيب)؟	
لم أجرب المعاشرة الجنسية	صعب إلى أقصى درجة	صعب جدًا	صعب	صعب قليلاً	غير صعب	0	1	2	3	4	5	4. أثناء المعاشرة الجنسية، إلى أي درجة كان من الصعب أن تحافظ على انتصابك بما يكفي لإتمام الجماع؟
لم أجرب المعاشرة الجنسية	تقريبًا مطلقًا أو مطلقًا	بضع مرات (أقل بكثير من نصف عدد المرات)	أحيانًا (قرابة نصف أكثر بكثير من نصف عدد المرات)	أغلب المرات	0	1	2	3	4	5	5. عندما جُرِّبت المعاشرة الجنسية، كم مرة كانت مُرضية لك؟	

اجمع الأرقام المكافئة للأسئلة 1-5. الإجمالي:

يصنّف مقياس جرد الصحة الجنسية للرجال (Sexual Health Inventory for Men) شدة قصور الانتصاب حسب النقاط الخديّة التالية:

7-1 قصور انتصاب شديد 11-8 قصور انتصاب متوسط 16-12 قصور انتصاب بسيط إلى متوسط 21-17 قصور انتصاب بسيط

مستودع الصحة الجنسية للرجال (SHIM)³

غالبًا ما يُستخدم هذا الاختبار لمساعدة الأطباء على تحديد درجة قصور الانتصاب (ED) لدى المرضى.

ناقش الإجابات مع طبيبك اليوم.

بعد أن تجري الاختبار، ضع قائمة بما يخطر لك من أسئلة ومخاوف، قص الاختبار الذي أكملته وسلّمه إلى مكتب طبيب المسالك البولية لمزيد من المحادثة العميقة عن الخطوات التالية المحتملة.



تتضمن الآثار الجانبية الضارة المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر، الألم في الجهاز البولي التناسلي (الذي يصاحب عادةً مرحلة التعافي)، والوذمة البولية التناسلية، والكدمات البولية التناسلية، والاحمرار الجلدي في الجهاز البولي التناسلي، وتُغْلَف المستودع، وعدم رضا المريض، والنفخ التلقائي، والعطل الألي، وضعف التبول.

قبل استخدام تلك الأجهزة، يُرجى مراجعة تعليمات الاستخدام لتتعرف على القائمة الكاملة لدواعي الاستخدام، وموانع الاستخدام، والتحذيرات، والاحتياطات، والآثار الجانبية الضارة المحتملة.

الموجز المختصر للجهاز التعويضي للقضيب القابل للنفخ من سلسلة AMS 700™

أجهزة سلسلة AMS 700™ التعويضية للقضيب القابلة للنفخ مُعدّة للاستخدام لعلاج قصور الانتصاب المزمن، والعضوي (العجز الجنسي) لدى الذكور.

يُحظر استخدام هذه الأجهزة مع المرضى المصابين بعدوى نشطة بالجهاز البولي التناسلي أو عدوى نشطة بالجلد في منطقة إجراء العملية الجراحية أو المصابين (في حالة جهاز AMS 700 المزود بإنهبيزون (InhibiZone™))، بالحساسية أو الأرجية المعروفة إزاء ريفامبين (rifampin) أو مینوسايكلين (minocycline) أو غير ذلك من أدوية التتراسايكلين (tetracyclines).

سيجعل تركيب الغرسات الانتصابيات الطبيعية أو التلقائية الكامنة، وغير ذلك من خيارات العلاج التدخلي، مستحيلة. وقد يكون الرجال المصابون بمرض السكري أو إصابات الحبل الشوكي أو القروح المفتوحة أكثر عرضة لخطر العدوى. وقد يؤدي فشل تقييم تآكل الجهاز وعلاجه إلى العدوى وفقدان الأنسجة. وقد يؤدي الغرس إلى قصر القضيب أو انحنائه أو تندبه.



شهادات المرضى

تحكي القصص المذكورة ضمن هذه النشرة خبرات أشخاص يستخدمون علاجات AMS المرتبطة بقصور الانتصاب. وقد توجهت AMS بدعوة هؤلاء الأشخاص لمشاركة قصصهم بصراحة. وخلال استعراضك لها، يرجى أن تضع في اعتبارك أن تلك الخبرات تخص هؤلاء الأشخاص بعينهم. وكما هو الحال في كل علاج طبي، لا تتماثل الاستجابات - وتتباين النتائج.

تتضمن الآثار الجانبية الضارة المحتملة، على سبيل المثال لا الحصر، الألم في الجهاز البولي التناسلي (الذي يصاحب عادةً مرحلة التعافي)، وعدم رضا المريض، والعطل الآلي، والنفخ التلقائي، وانحناء القضيب أو تغير الإحساس به، والورم الدموي البولي التناسلي، والوذمة البولية التناسلية، والعدوى.

قبل استخدام تلك الأجهزة، يُرجى مراجعة تعليمات الاستخدام لتتعرف على القائمة الكاملة لدواعي الاستخدام، وموانع الاستخدام، والتحذيرات، والاحتياطات، والآثار الجانبية الضارة المحتملة.

الموجز المختصر للجهاز التعويضي للقضيب من طراز Ambicor™

الأجهزة التعويضية للقضيب القابلة للنفخ من طراز AMS Ambicor™ مُعدة للاستخدام لعلاج قصور الانتصاب المزمن، وأصلي المنشأ (العجز الجنسي) لدى الذكور.

يُحظر استخدام هذه الأجهزة مع المرضى المصابين بعدوى نشطة بالجهاز البولي التناسلي أو عدوى نشطة بالجلد في منطقة إجراء العملية الجراحية.

سيجعل تركيب الغرسات الانتصابات الطبيعية أو التلقائية الكامنة، وغير ذلك من خيارات العلاج التندلي، مستحيلة. وقد يكون الرجال المصابون بمرض السكري أو إصابات الحبل الشوكي، أو القروح المفتوحة أكثر عرضة لخطر العدوى. وقد يؤدي فشل تقييم تآكل الجهاز وعلاجه إلى العدوى وفقدان الأنسجة. وقد يؤدي الغرس إلى قصر القضيب أو انحنائه أو تندبه.

قم بالخطوة التالية

يمكن لقصور الانتصاب (ED) أن يؤثر على حميميتك وثقتك بنفسك وقد يؤثر على علاقتك بشريكك. ولكن هناك أخبارًا سارة، فاليوم، صارت كل حالة تقريبًا من حالات قصور الانتصاب قابلة للعلاج.

للحصول على مزيد من المعلومات عن العلاجات المتاحة، تفضل زيارة EDCures.com

تحدث إلى طبيب مسالك بولية متخصص في قصور الانتصاب وسيقدم لك خيارات العلاج كاملة، بما في ذلك الغرسات.



هل أنت في حاجة لمساعدة للتوصل إلى طبيب خبير على مقربة منك؟ تفضل بزيارة خاصية "توصل إلى اختصاصي غرس الأطراف الاصطناعية EDCures.com على (Find an Implanter)"



شاهد قصص المرضى الحقيقية على EDCures.com



1. Rajpurkar A, Dhabuwala C. Comparison of satisfaction .rates and erectile function. J Urol. 2003;170:159-163
12. Montorsi F, Rigatti P, Carmignani G, et al. AMS three-piece inflatable implants for erectile dysfunction: a long-term multi-institution study in 200 consecutive patients. Eur Urol. 2000;37:50-55
13. Dymedex Consulting. Assessment of the market potential. (PPI) for Penile Prosthetic Implants. 2010. نوفمبر 2010.
14. دليل غرفة العمليات للجهاز التعويضي للقضيب من نوع AMS 700™ أمريكيان ميديكال سيستيمز (American Medical Systems). 2012.
15. تعليمات استخدام خط إنتاج الجهاز التعويضي للقضيب AMS 700™ أمريكيان ميديكال سيستيمز (American Medical Systems). 2012.
16. Otero JR, Cruz CR, Gómez BG, et al. Comparison of the patient and partner satisfaction with 700CX and Titan penile prostheses. Asian J Androl. 2017 May-Jun;19(3):321-5
17. البيانات المدرجة في الملف مع Boston Scientific وبناء على بحث السوق بواسطة Dymedex.
18. Sellers T, Dineen M, Salem E, et al. Vacuum preparation optimization of cylinder length and postoperative daily inflation reduces complaints of shortened penile length following implantation of inflatable penile prosthesis. Adv in Sex Med. 2013 Jan;3(91):14-8
19. Kamel I, Gadalla A, Ghanem H, et al. Comparing penile measurements in normal and erectile dysfunction subjects. J Sex Med. 2009 Aug;6(8):2305-10
20. AMS 700™ with MS Pump™ Penile Prosthesis Operating Room Manual (American Medical). أمريكيان ميديكال سيستيمز (Systems). 2018.
1. Erectile dysfunction. http://kidney.niddk.nih.gov/KUDiseases/pubs/ED/ErectileDysfunction_508.pdf الموقع الإلكتروني لـ National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse. تم تنزيله بتاريخ 21 يناير 2013.
2. Selvin E, Burnett A, Platz E. Prevalence and risk factors for erectile dysfunction in the U.S. Am J Med. 2007;(120):151-157
3. قصورا الانتصاب (ED). www.auanet.org/content/education-and-meetings/med-stu-curriculum/ed.pdf الموقع الإلكتروني لرابطة American Urological Association. تم تنزيله بتاريخ 21 يناير 2013.
4. DiMeo PJ. Psychosocial and relationship issues in men with erectile dysfunction. Urol Nurs. 2006;26(6):442-453
5. معلومات وصف دواء فياجرا (Viagra®)، شركة فايزر (Pfizer)، تمت المراجعة في يناير 2010.
6. معلومات وصف دواء سياليس (Cialis®)، شركة ليلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ش.ذ.م.م (Lily USA, LLC). تمت المراجعة في أكتوبر 2011.
7. معلومات وصف دواء ليفيترا (Levitra®)، باير لأدوية الرعاية الصحية (Bayer HealthCare Pharmaceuticals). تمت المراجعة في نوفمبر 2011.
8. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Management of erectile impotence: use of implantable inflatable prosthesis. Urology. 1973;2(1):80-82
9. Penile prosthesis. <http://www.essm.org/society/eshal/males/oraltreatments/penileprosthesis.html> الموقع الإلكتروني لرابطة (ESSM) European Society for Sexual Medicine. تم تنزيله بتاريخ 1 يناير 2013.
10. دليل المريض بخصوص AMS 700™ المعلومات والتعليمات الخاصة بالمرضى الذين يفكرون في الحصول على أجهزة تعويضية للقضيب قابلة للنفخ (Inflatable Penile Prosthesis). أمريكيان ميديكال سيستيمز (American Medical Systems). 2012.